

# Para personas con insuficiencia cardíaca

## Presentamos la terapia de CCM®

# La esperanza ha llegado

### 1 ¿Qué es la terapia de CCM?



La terapia de modulación de la contractilidad cardíaca (Cardiac Contractility Modulation, CCM) es una nueva forma de mejorar la acción de bombeo del corazón en personas con insuficiencia cardíaca. El Optimizer® Smart Mini es un dispositivo que administra terapia de CCM. Más de 9000 pacientes en 45 países reciben actualmente terapia de CCM.

### 2 ¿A quiénes beneficia la terapia de CCM?


La terapia de CCM suele ser útil en los siguientes casos:



En pacientes cuyos síntomas, como fatiga, dificultad para respirar e hinchazón de las piernas, persisten a pesar de tomar medicamentos para el corazón.



En pacientes cuyo cuadro de insuficiencia cardíaca está empeorando.

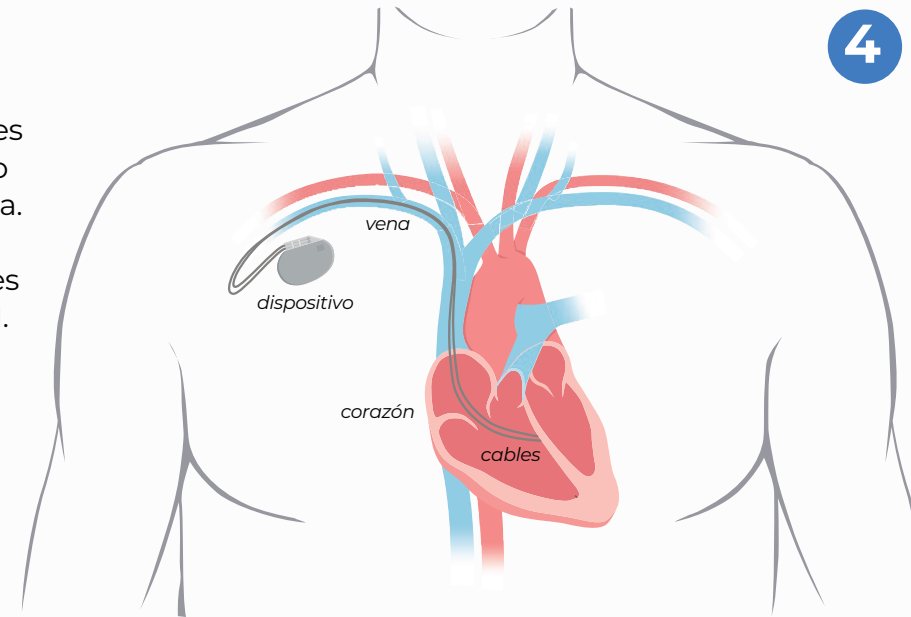

### 4 ¿Qué implica un implante de terapia de CCM?

El Optimizer Smart Mini se implanta mediante un procedimiento sencillo y mínimamente invasivo en el que se utiliza un sedante suave. El paciente es dado de alta a su domicilio el mismo día.

El dispositivo, que cabe en la palma de la mano, se inserta debajo de la piel de la parte superior del pecho, justo debajo de la clavícula. Tiene una duración de batería de 20 años.

Dos cables van desde el dispositivo a través de una vena hasta el corazón.

### 5 ¿Cómo funciona la terapia de CCM?

El Optimizer Smart Mini envía pulsos eléctricos sincronizados con precisión al corazón durante 5 horas todos los días en tratamientos de 1 hora.



En cuestión de horas, la capacidad de bombeo del corazón mejora.



Al cabo de días o semanas, la forma y el tamaño del corazón vuelven a la normalidad y la función de bomba del corazón continúa mejorando<sup>2</sup>.

### 3 ¿Cómo me ayudará la terapia de CCM?

En estudios clínicos, el 81% de los pacientes tratados con terapia de CCM mejoraron significativamente<sup>1</sup>. La terapia de CCM puede proporcionar importantes beneficios:



Mejorar la calidad de vida



Aminorar la dificultad para respirar



Caminar mayores distancias



Aumentar la capacidad de hacer ejercicio

Hable con su proveedor sobre si la terapia de CCM es adecuada para usted.

El seguro la cubre cuando sea médicamente necesaria.



Tengo insuficiencia cardíaca

# ¿La terapia de CCM<sup>®</sup> es adecuada para mí?

Un nuevo tipo de tratamiento para personas con insuficiencia cardíaca



# *Recomponer la vida cotidiana de los pacientes con insuficiencia cardíaca*



Para obtener más información sobre la terapia de CCM, visite

**GetCCM.health**

